

Profil produktu

ActiMaris® výrazně urychluje hojení širokého spektra ran a zánětů kůže a sliznic. Komplexnost účinnosti je dána synergii jednotlivých složek přípravku. ActiMaris® dodává tkáním kyslík, energii a minerální látky nezbytné pro hojení. Má výrazný čisticí efekt, účinně eliminuje patogeny, rychle redukuje zánět, otok a zápach. Podporuje tvorbu nové tkáně.

Aktivní (singletový) kyslík ^{1,2}

Patří mezi vysoce aktivní formy kyslíku s velkým množstvím energie. Při kontaktu roztoku nebo gelu ActiMaris® s kůží, sliznicí nebo spondinou rány se ihned uvolňuje z NaOCl, narušuje struktury mikrobiů – bakterií, virů, plísní, kvasinek a spor, a tím je ničí. Dále pomáhá aktivovat procesy oxygenace a regenerace a podporuje tak rychlejší tvorbu nové tkáně. Singletový kyslík vzniká také v řadě běžných reakcí v organismu jako součást obranného mechanismu proti infekci. Na fyzikální působení singletového kyslíku si mikroby nedokáží vytvořit rezistenci. Vysoká účinnost přípravku ActiMaris® je tak zcela zachována i při dlouhodobém používání.

Zásadité pH (až 9,8)

Zásadité prostředí má obecně příznivý vliv na hojení ran a zánětů. Přírodní mořská voda je také zásadité (pH 8–8,5). Zásadité látky působí jako tzv. antioxidanty. Deaktivují volné radikály, které rušují proces hojení. Také enzymy a neuropřenašeče, které jsou důležité pro jednotlivé fáze hojení, vykazují optimální aktivity při zásaditém pH. Přípravky ActiMaris® mají pH v rozmezí 8,5 (roztok Sensitiv) – 9,8 (roztok Forte a Gel). Díky zásaditému pH umožňují delší působení aktivního kyslíku a podporují procesy hojení na kůži i sliznici.

Mořská sůl 1,2–3,0 %

Obsahuje až 80 minerálních látek (nejvíce hořčíku), které podporují proces hojení. Vzhledem k tomu, že koncentrace mořské soli je ve všech přípravcích ActiMaris® vyšší než fyziologická hodnota 0,9%, vzniká zde příznivý hyperosmotický efekt, který pomáhá ránu čistit a snižuje její otok a tím i bolestivost.

Ionizovaná mořská voda

Má schopnost přenášet minerální látky a kyslík hlouběji do tkáně, protože shluky molekul ionizované vody jsou menší než u běžné vody. Ionizovaná zásaditá voda v přípravcích ActiMaris® má výrazně antioxidační účinky.

Oblasti použití

• Akutní rány

Po operační rány a jizvy, řezné, tržné rány, odřeniny, spáleniny, puchýře

• Chronické a stagnující rány – běrcové a diabetické vředy, dekubity, pštěle, ulcerující nádory, nekrózy

• Infekční a zapáchající rány

• Zánětlivé procesy na kůži a sliznici

Akné, dermatitidy, ekzémy, opruzeniny, záněty hltanu, dutiny ústní, nosní, genitální, zevního zvukovodu, afty, opary, plísňové infekce

• Popáleniny 1.–3. stupně

• Peroperační výplach ran (dutina břišní, hrudní, okolí kloubu)

• Prevence a eliminace infekce, dekontaminace MRSA, VRE, ...

ActiMaris® – výhody

- Výrazně zkracuje dobu hojení
- Rychle snižuje zánět, otok a případný zápach
- Ničí široké spektrum mikrobiů – viry, bakterie, plísně, kvasinky, spory
- Podporuje a urychluje tvorbu nové tkáně
- K použití do ran, na kůži i sliznici
- Pro dospělé, děti, kojence i novorozence
- 100% přírodní – bez konzervantů, stabilizátorů, alkoholu
- Bez vedlejších a nežádoucích účinků
- Délka použití není omezena – nevzniká rezistence, neklesá účinnost
- Lze kombinovat se všemi moderními prostředky k hojení ran

Složení

Z přírodních složek elektrolýzou získaný NaOCl (zdroj singletového kyslíku ^{10,2}), mořská sůl, ionizovaná voda

¹ Výsledky testování účinnosti a bezpečnosti ActiMaris, státní laboratoř ČR, 2017, 2018, 2019

² A clinical evaluation of the efficacy and safety of singlet oxygen in cleaning and disinfecting stagnating wounds. Journal of Wound Care, 2011–2013

³ Konference ČSLR, Hojení ran v kostce, FN Olomouc, 9/2021

Výhradní distributor pro ČR a SR:

EMPOLAS

EMPOLAS s.r.o.
Česká republika
info@empolas.com
www.empolas.com

ActiMaris AG
Sandgrube 29
9050 Appenzell
ŠVÝCARSKO

www.ActiMaris.cz

Vývoj a výroba:
ActiMaris AG



infolinka: 775 335 111

UNIKÁTNÍ RYCHLÉ HOJENÍ RAN A ZÁNĚTŮ

VYSOKÁ ÚČINNOST A BEZPEČNOST POTVRZENA¹

- + Výrazně zkracuje dobu hojení
- + Rychle snižuje zánět, otok, zápach
- + Ránu čistí, zvlhčuje, odstraňuje biofilm
- + Eliminuje viry, bakterie, kvasinky, plísně, spory
- + Použití kdekoli na kůži i sliznici



ActiMaris je č. 1 v neonatologii
nejpoužívanější přípravek na hojení všech typů ran
u novorozenců a kojenců³

ActiMaris® Gel
na rány, kůži a sliznici
20 g



ActiMaris® Forte roztok
na rány, kůži a sliznici
300 ml | 1000 ml



K ošetření a urychlení hojení širokého spektra akutních i chronických ran a zánětů na kůži i sliznici. Je vhodný na: pooperační rány a jizvy, běžná drobná akutní poranění, běrcové či diabetické vředy, infekční rány. Záněty dutiny ústní a nosní, plísňové infekce, akné, afty, opary. Rychle nastartuje proces hojení a výrazně ho urychluje. Dodává ráně potřebný kyslík, energii a minerální látky.

Jak používat ActiMaris® Gel:

Při hojení akutních i chronických ran:

1. Z rány nejdříve odstraňte případné hrubé nečistoty nebo povlaky. Pro čištění rány, eliminaci povlaku, hnisu a mikrobů můžete nejdříve použít roztok ActiMaris® Sensitiv nebo Forte.
2. Na ránu jemně naneste ActiMaris® Gel ve vrstvě 1–2 mm.
3. Překryjte sterilním krytím, gázou nebo přelepte náplastí.
4. Výměnu krytí s aplikací ActiMaris® Gelu provádějte dle potřeby a stavu rány, optimálně 1–2× denně.

Při hojení aftů, oparů a zánětu dutiny ústní:

1. ActiMaris® Gel naneste ve vrstvě 2–3 mm přímo na postižené místo a nechte působit.
2. Aplikaci opakujte podle potřeby až do zmírnění či vymízení obtíží. Ze začátku alespoň 3× denně, čím častěji, tím lépe.
3. Při těžších zánětech nebo pokud je v ústech hnědě několik aftu najednou, je vhodné ústa nejdříve vypláchnout roztokem ActiMaris® Sensitiv nebo Forte.

Při hojení akné:

1. Nejdříve navlhčete vatový tampon roztokem ActiMaris® Forte nebo Sensitiv (dle závažnosti akné) a důkladně jím očistěte kůži.
2. Následně na oblast vřídků naneste ActiMaris® Gel ve vrstvě cca 2–3 mm a nechte na kůži působit až do zaschnutí.
3. Celý postup opakujte minimálně 2×, optimálně 3× denně.



Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.



Nanessení štětičkou



Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

ActiMaris® Sensitiv roztok
na rány, kůži a sliznici
300 ml | 1000 ml



K intenzivnímu čištění, dekontaminaci, odstranění biofilmu, snížení zánětu a urychlení hojení akutních a především chronických ran. Je určen k použití na kůži i sliznici úst či genitálií. ActiMaris® Forte rychle a výrazně sniže zánět, otok a případný zápach rány. Má vysoký antimikrobiální (mikrobicidní) účinek.

- Indikace:** • špatně se hojící, infekční, povleké, zapáchaní rány
- běrcové, diabetické vředy, dekubity, pištěle, nekrózy
 - těžší formy akné, záněty dásní, stomatitidy
 - plísňové infekce na kůži a sliznici úst či genitálií
 - dekontaminace těla při nálezu MRSA, VRE apod.

Jak používat ActiMaris® Forte roztok:

ActiMaris® Forte roztok se používá k obkladu či oplachu ran na kůži nebo k výtěru či výplachu dutiny ústní či genitálií. Lze jej použít samostatně nebo v kombinaci s ActiMaris® Gelem.

Při hojení chronických ran:

1. Před samotným ošetřením přípravky ActiMaris® je vhodné ránu nejprve sehnětne osprchovat, abyste ji zbavili zbytků masti a případných povlaků a krust.
2. Roztokem ActiMaris® Forte důkladně navlhčete sterilní krytí (např. gázu) a toto přiložte na ránu jako obklad: čisté rány 5–15 minut, povleké, zapáchaní, infikované rány 15–30 minut.
3. Po odstranění obkladu nechte ránu 5 minut oschnout.
4. Pro další urychlení hojení je výhodná kombinace s ActiMaris® Gelem. Na ránu naneste ActiMaris® Gel v souvislé vrstvě 1–2 mm a překryjte sterilním krytím. Aby kryt nepřilnulo k ráně, je možné pod něj použít např. mastný tyl.
5. Výměnu obvazů a krytí s následnou aplikací ActiMaris® Gelu provádějte dle potřeby a stavu rány, optimálně 1–2× denně.
6. Příležitě krytí k ráně, navlhčete ho nejdříve roztokem a nechte působit do doby, než ho budete moci volně odstranit.



ActiMaris® Sensitiv roztok
na rány, kůži a sliznici
300 ml | 1000 ml



K čištění, zvlhčení, dekontaminaci a snížení zánětu akutních a chronických ran, popálenin 1.–3. stupně. Vhodný i pro citlivou a podrážděnou kůži a na sliznici dutiny ústní, nosní a genitálií. Určen i pro děti a kojence.

Jak používat ActiMaris® Sensitiv roztok:

ActiMaris® Sensitiv roztok se používá k obkladu či oplachu ran na kůži nebo k výtěru či výplachu dutiny ústní, nosní či genitálií. Lze jej použít samostatně nebo v kombinaci s ActiMaris® Gelem.

Při hojení akutních a chronických ran:

1. Z rány nejdříve odstraňte případné hrubé nečistoty apod.
2. Vypláchněte ránu roztokem nebo navlhčete sterilní krytí (gázu), přiložte na ránu a nechte 20–30 minut působit.
3. Pro urychlení hojení následně na ránu naneste ActiMaris® Gel v souvislé vrstvě 1–2 mm a překryjte sterilním krytím.
4. Výměnu krytí a obvazů s aplikací ActiMaris® Gelu provádějte dle stavu rány, optimálně 1–2× denně.

Při výplachu a ošetření dutiny ústní:


Roztokem ActiMaris® Sensitiv můžete vypláchnout a ošetřit celou dutinu ústní i nosní. Aplikujte přiměřené množství (1–2 polévkové lžice) roztoku a nechte v ústech alespoň 30 sekund působit. Opakujte 3× denně, nejlépe po jídle. Pro zesílení účinku nejezte a nepijte ještě 15 minut po aplikaci. K výplachům nosu roztokem ActiMaris® Sensitiv doporučujeme použít konvičku k tomu určenou.



Pro výplach dutiny nosní



Pro použití formou obkladu

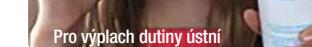

Pro výplach dutiny ústní