

### Profil produktu

ActiMaris® čistí, zvlhčuje, uychluje hojení a pomáhá snížit zánět, dok a zápach rány. Dodává tkáním kyslík, energii a minerály. K tomu dochází v důsledku interakcí mezi jednotlivými složkami přípravku. Aktivní singletový kyslík, mořská sůl, ionizovaná voda a zásadité pH pomáhají nastartovat buněčné regenerační procesy, urychlit hojení a současně rychle eliminovat škodlivé mikroorganismy.

### Aktivní (singletový) kyslík $^1O_2$

Patří mezi vysoce aktivní formy kyslíku s velkým množstvím energie. Při kontaktu s kůží, sliznicí nebo spodinou rány se ihned uvolňuje, narušuje stěny mikrobů – bakterií, virů, plísní, kvasinek a spor, a tím je ničí. Dále pomáhá tkáním aktivovat vlastní procesy regenerace a podporuje tak rychlejší tvorbu nové tkáně. Singletový kyslík vzniká také v řadě běžných reakcí v organismu jako součást obranného mechanismu proti infekci. Na fyzikální působení singletového kyslíku si bakterie nedokáží vyvinout rezistenci. Vysoká účinnost přípravků ActiMaris® je tak zcela zachována i při dlouhodobém podávání.

### Zásadité pH (až 9,8)

Zásadité prostředí má obecně příznivý vliv na hojení ran a zánětů. Přírodní mořská voda je také zásaditá (pH 8–8,5). Zásadité látky působí jako tzv. antioxidanty. Deaktivují volné radikály, které narušují proces hojení. Také enzymy a neuro-přenašeče, které jsou důležité pro jednotlivé fáze hojení, vykazují optimální aktivitu při zásaditém pH. Přípravky ActiMaris® mají pH v rozmezí 8,5 (roztok Sensitiv) – 9,8 (roztok Forte a Gel). Díky zásaditému pH umožňují delší působení aktivního kyslíku a mají příznivý hojivý efekt na kůži i sliznici.

### Mořská sůl 1.2–3.0 %

Obsahuje až 80 minerálů (nejvíce hořčíku), které podporují proces hojení. Vzhledem k tomu, že koncentrace mořské soli je ve všech přípravcích ActiMaris® vyšší než fyziologická hodnota 0.9%, vzniká zde příznivý hyperosmotický efekt, který pomáhá ránu čistit a snižuje její otok a bolestivost.

### Ionizovaná mořská voda

Má schopnost přenášet minerály a kyslík hlouběji do tkáně, protože shluky molekul ionizované vody jsou menší než u normální vody, a tak pronikají hlouběji. Ionizovaná zásaditá voda má výrazné antioxidační účinky.

### Oblasti použití

- **Akutní rány**
  - odřeniny, řezné, tržné rány, opruzeniny, spáleniny, puchýře, bodnutí hmyzem
- **Zánětlivé procesy na kůži a sliznici**
  - akné, afty, opary, záněty dásní a dutiny ústní, záněty zvukovodu, plísňové infekce
- **Pooperační rány a jizvy**
- **Chronické, infekční a zápachající rány**
  - dekubity, bércové a diabetické vředy, píštěle
- **Popáleniny 1. až 3. stupně**
- **K dekontaminaci při nálezů velmi rezistentních bakterií (MRSA, VRE apod.)**

### ActiMaris® – výhody

- Výrazně zkracuje dobu hojení
- Rychle snižuje zánět, otok a případný zápach
- Ničí nejširší spektrum mikrobů – viry, bakterie, plísně, kvasinky, spory
- Urychluje tvorbu nové tkáně
- Dodává tkáním kyslík, energii a minerály
- K použití na kůži i sliznici úst, nosu a genitálií
- Vhodný i pro děti a kojence
- 100% přírodní – bez konzervantů a stabilizátorů

### Složení

aktivní singletový kyslík  $^1O_2$ , mořská sůl, ionizovaná zásaditá voda

Zdravotnický prostředek, třída IIb

ActiMaris AG



simple medical solutions

ActiMaris AG  
Technikumstrasse 14  
+ CH-9470 Buchs, Švýcarsko

Distributor pro ČR a Slovensko:  
EMPOLAS s.r.o.  
Česká republika  
info@empolas.com  
tel: +420 602 556 877

ActiMaris AG  
  
Švýcarsko

[www.actimaris.cz](http://www.actimaris.cz)  
infolinka: 775 335 111

# UNIKÁTNÍ RYCHLÉ HOJENÍ RAN A ZÁNĚTŮ

na kůži i sliznici



**ActiMaris®**  
inspirováno přírodou

- + Aktivní singletový kyslík  $^1O_2$
- + Ionizovaná voda
- + Mořská sůl
- + Zásadité pH



**NIČÍ NEJŠIRŠÍ SPEKTRUM MIKROBŮ  
NEZPŮSOBUJE KOŽNÍ REAKCE**



ActiMaris AG  
  
Švýcarsko

[www.actimaris.cz](http://www.actimaris.cz)  
infolinka: 775 335 111

## ActiMaris® Gel na hojení ran 20 g

K ošetření a urychlení hojení širokého spektra akutních i chronických ran a zánětů na kůži i sliznici. Je vhodný na: běžná drobná akutní poranění, akné, afty, opary, záněty dutiny ústní, plísňové infekce, bércové či diabetické vředy, infekční rány apod. Rychle nastartuje proces hojení a výrazně ho urychluje. Dodává ráně potřebný kyslík, energii a minerály.

### Jak používat ActiMaris® Gel

#### Při hojení akutních i chronických ran:

1. Z rány nejdříve odstraňte případné hrubé nečistoty nebo povlaky. Pro čištění rány, eliminaci povlaku, hnisu a mikrobu můžete nejdříve použít roztok ActiMaris® Sensitiv nebo Forte.
2. Na ránu jemně naneste ActiMaris® Gel ve vrstvě 1–2 mm.
3. Překryjte sterilním krytím, gázou nebo přelepte náplastí.
4. Výměnu krytí s aplikací ActiMaris® Gelu provádějte dle potřeby a stavu rány, optimálně 1–2× denně.

#### Při hojení aftů, oparů a zánětů dutiny ústní.

1. ActiMaris® Gel naneste ve vrstvě 2–3 mm přímo na postižené místo a nechte působit.
2. Aplikaci opakujte podle potřeby až do zmírnění či vymizení obtíží. Ze začátku 3× denně.
3. Při těžších zánětech nebo pokud je v ústech hned několik aftů najednou, je vhodné ústa nejdříve vypláchnout roztokem ActiMaris® Sensitiv nebo Forte.

#### Při hojení akné:

1. Nejdříve navlhčete vatový tampon roztokem ActiMaris® Forte nebo Sensitiv (dle závažnosti akné) a důkladně očistěte kůži.
2. Následně na oblast vřídků naneste ActiMaris® Gel ve vrstvě cca 2–3 mm a nechte na kůži působit až do zaschnutí.
3. Celý postup opakujte minimálně 2×, optimálně 3× denně.



## ActiMaris® Forte – roztok na čištění a hojení ran 300 ml

K intenzivnímu čištění, dekontaminaci, snížení zánětu a urychlení hojení akutních a především chronických ran. Je určen k použití na kůži i sliznici úst, nosu či genitálií. ActiMaris Forte rychle a výrazně snižuje zánět, otok a případný zápach rány. Má vysoký antimikrobiální a antimykotický účinek.

- Indikace:**
- špatně se hojící, infekční, příp. zapáchající rány
  - bércové, diabetické vředy, dekubity, píštěle
  - těžší formy akné, záněty dásní, stomatitidy
  - plísňové infekce na kůži a sliznici úst či genitálií
  - dekontaminace těla při nálezu MRSA/VRE

### Jak používat ActiMaris® Forte roztok:

ActiMaris Forte roztok se používá k obkladu či oplachu ran na kůži nebo k výtěru či výplachu dutiny ústní či genitálií. Lze jej použít samostatně nebo v kombinaci s ActiMaris® Gelem.

#### Při hojení chronických ran:

1. Roztokem ActiMaris® Forte navlhčete sterilní krytí a přiložte na ránu jako obklad. Dle potřeby překryjte nesavým krytím (např. mastným tylem) a převažte obinadlem.
2. Navlhčené krytí vyměňujte dle stavu rány, optimálně 1–2× denně.
3. Pro další urychlení hojení je výhodná kombinace s ActiMaris® Gelem. V tomto případě ponechte navlhčené krytí na ráně 20–30 minut působit, aby se rána vyčistila. Poté naneste na ránu ActiMaris® Gel (vrstvu 1–2 mm) a překryjte sterilním krytím.
4. Výměnu krytí a obvazů s následnou aplikací ActiMaris® Gelu provádějte dle potřeby a stavu rány, optimálně 1–2× denně.
5. Je-li krytí přilepené k ráně, navlhčete ho nejdříve roztokem a nechte působit do doby, než ho budete moci volně odstranit.



## ActiMaris® Sensitiv – roztok na výplach a hojení ran 300 ml

K zvlhčení, dekontaminaci, snížení zánětu a čištění akutních a chronických ran a popálenin na kůži a sliznici. Vhodný pro citlivou a podrážděnou kůži a sliznici dutiny ústní, nosní a genitálií. Určen i pro děti a kojence.

### Jak používat ActiMaris® Sensitiv roztok:

ActiMaris Sensitiv roztok se používá k obkladu či oplachu ran na kůži nebo k výtěru či výplachu dutiny ústní, nosní či genitálií. Lze jej použít samostatně nebo v kombinaci s ActiMaris® Gelem.

#### Při hojení akutních i chronických ran:

1. Z rány nejdříve odstraňte případné hrubé nečistoty apod.
2. Vypláchněte ránu roztokem nebo navlhčete gázu (čtverec), přiložte na ránu a nechte 20–30 minut působit.
3. Pro urychlení hojení následně na ránu naneste ActiMaris® Gel ve vrstvě 1–2 mm a překryjte sterilním krytím.
4. Výměnu krytí a obvazů s aplikací ActiMaris® Gelu provádějte dle stavu rány, optimálně 1–2× denně.

#### Při výplachu dutiny ústní:

Roztokem ActiMaris Sensitiv můžete vypláchnout a ošetřit celou dutinu ústní i nosní. Aplikujte přiměřené množství (1–2 polévkové lžičice) roztoku a nechte v ústech alespoň 30 sekund působit. Opakujte 3× denně, nejlépe po jídle. Pro zesílení účinku nejezte a nepijte ještě 15 minut po aplikaci. Na místa s případnými afekcemi je poté vhodné nanést ActiMaris® Gel na hojení ran.

