

RIGENOMA®

TEJPOVACÍ PÁSKA
S OPAKOVANOU AKTIVACÍ

ADHEZIVNÍ ELASTICKÁ PÁSKA
s dvojnásobným terapeutickým účinkem díky
MIKROBUŇKÁM S OPAKOVANOU AKTIVACÍ

PATENT ERBAGIL



OZOILE®
UNIKÁTNÍ PATENT
Stabilní Ozonidy

Regeneruje pokožku pomocí:

RIGENOMA® TEJPOVACÍ PÁSKA S OPAKOVANOU AKTIVACÍ je revoluční produkt. Je vybavena mikrobuňkami s možností opětovné aktivace pomocí přípravků RIGENOMA® sprej nebo RIGENOMA® krém.

RIGENOMA® TEJPOVACÍ PÁSKA S OPAKOVANOU AKTIVACÍ tvořena z 96 % bavlnou a koloidními látkami z léčivých rostlin s elasticko-retikulární strukturou. Je určena ke zlepšení kvality postižené kůže a obnovení jejího funkčního stavu. Při aplikaci dekompresní technikou snižuje lymfatickou a krevní stázi, zlepšuje místní mikrocirkulaci a aktivaci pohybem podporuje vstřebávání otoků, zároveň optimalizuje hojení jizev, předchází a brání tvorbě keloidů. OZOILE® chrání, elastifikuje a hydratuje pokožku, uvolňuje kyslík a působí proti oxidačnímu stresu a degenerativním procesům.

HLAVNÍ SLOŽKY

96% bavlna, 4% polyuretan, OZOILE® (stabilní ozonidy), extrakt z květu arniky horské, extrakt z kořene harpagofyty, extrakt z listu černého rybízu, bromelain, panthenol, extrakt z boswellie (kadidlovník pilovitý)

OZOILE® je patentovaná složka obsažená v mikrobuňkách elasticko-retikulární struktury RIGENOMA® TEJPOVACÍ PÁSKY S OPAKOVANOU AKTIVACÍ, která vzniká vazbou ozonu na olejové vazby organického olivového oleje. OZOILE® má ochranný, protizánětlivý a protisvědivý účinek, působí proti hypoxii, oxidačnímu stresu a degenerativním procesům. Zároveň vytváří nepříznivé prostředí pro změny mikrobioty. OZOILE® elastifikuje, hydratuje a normalizuje pokožku.

INDIKACE


RIGENOMA® TEJPOVACÍ PÁSKA S OPAKOVANOU AKTIVACÍ s OZOILE® je unikátní elastická adhezivní páska, aktivovaná pohybem. Aplikovaná dekompresní technikou redukuje lymfatickou a krevní stázi, zlepšuje místní mikrocirkulaci, usnadňuje vstřebávání otoků, podporuje tvorbu pojivové tkáně. Obnovuje zdravou funkci postižené kůže, zejména u tvorby nových jizev, které udržuje elastické bez stahování, předchází tvorbě keloidů a zlepšuje stav již existujících keloidů. Indikována je při pooperačních potížích a všech patologických stavech kůže, kde dochází ke kompresi tkáně, nedostatečné mikrocirkulaci, hromadění tekutin, toxinů a odpadních látek, což vede k zánětu, bolesti a otokům, například u potíží s páteří, ploténkami, svaly, šlachami a klouby. RIGENOMA® TEJPOVACÍ PÁSKA S OPAKOVANOU AKTIVACÍ s OZOILE® může být také doplňkem rehabilitačních terapií a jejich udržovací fáze.

JAK POUŽÍVAT

RIGENOMA® TEJPOVACÍ PÁSKU S OPAKOVANOU AKTIVACÍ s OZOILE® aplikujte dekompresní technikou, to znamená bez tahu a ve

směru maximální elasticity pokožky. Specifická technika aplikace závisí na oblasti a účelu použití.

Po 12–24 hodinách po aplikaci, aktivujte mikrobuňky pásky nanesením přípravku RIGENOMA® sprej nebo RIGENOMA® krém přímo na pásku a opakujte každých 24–48 hodin podle stavu nebo dle doporučení lékaře. Pásku sejměte v okamžiku, kdy ztratí přilnavost.

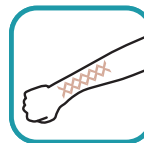

UPOZORNĚNÍ

Pouze k vnějšmu použití. Nepožívejte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte, pokud je obal poškozen. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Datum spotřeby se vztahuje na neporušený a správně skladovaný produkt. Skladujte na chladném a suchém místě mimo zdroje tepla a přímého slunečního záření. Uchovávejte nejlépe mezi 5 °C a 35 °C. Před použitím zdravotnického prostředku si dobře umyjte ruce. Po otevření se doporučuje výrobek spotřebovat do 6 měsíců. RIGENOMA® TEJPOVACÍ PÁSKA S OPAKOVANOU AKTIVACÍ s OZOILE® je dobře snášena. Nejsou známy žádné případy senzibilizace ani nežádoucích účinků. Nepoužívejte v případě zjištěné přecitlivělosti na přípravek nebo některou z jeho složek. V případě výskytu takového jevu přerušete používání a poraďte se s lékařem.

BALENÍ

Role 5 cm × 5 m



BEZ LEPKU BEZ LATEXU HYPOALERGENNÍ
VODĚODOLNÁ



ERBAGIL s.r.l.
Via L. Settembrini, 13
82037 Telese Terme (BN) Italy
www.erbagil.com



EMPOLAS s.r.o.
Česká republika
info@empolas.com
www.ozonidy.cz

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

RIGENOMA®

TEJPOVACIA PÁSKA
S OPAKOVANOU AKTIVÁCIOU

ADHEZÍVNA ELASTICKÁ PÁSKA
s dvojítm terapeutickým účinkom vďaka
MIKROBUNKÁM S OPAKOVANOU AKTIVÁCIOU

PATENT ERBAGIL



OZOILE®
UNIKATÍVNY PATENT
Stabilné Ozonidy

Regeneruje pokožku pomocou:

RIGENOMA® TEJPOVACIA PÁSKA S OPAKOVANOU AKTIVÁCIOU je revolučný produkt. Je vybavená mikrobunkami s možnosťou opätovnej aktivácie pomocou prípravkov RIGENOMA® sprej alebo RIGENOMA® krém. RIGENOMA® TEJPOVACIA PÁSKA S OPAKOVANOU AKTIVÁCIOU je tvorená z 96 % bavlnou a koloidnými látkami z liečivých rastlín s elastickoretikulárnou štruktúrou. Je určená na zlepšenie kvality postihnutej pokožky a obnovenie jej funkčného stavu. Pri aplikácii dekompresnou technikou znižuje lymfatickú a krvnú stázu, zlepšuje miestnu mikrocirkuláciu a aktiváciou pohybom podporuje vstrebávanie opuchov, zároveň optimalizuje hojenie jaziev, predchádza a bráni tvorbe keloidov. OZOILE® chráni, elastifikuje a hydratuje pokožku, uvoľňuje kyslík a pôsobí proti oxidačnému stresu a degeneratívnym procesom.

HLAVNÉ ZLOŽKY

96% bavlna, 4% polyuretán, OZOILE® (stabilné ozonidy), extrakt z kvetu amiky horskej, extrakt z koreňa harpagofytu, extrakt z listu čiernych ríbezlí, bromelain, panthenol, mentol, extrakt z boswellie (kadidlovník pílovyty)

OZOILE® je patentovaná zložka obsiahnutá v mikrobunkách elastickoretikulárnej štruktúry RIGENOMA® TEJPOVACEJ PÁSKY S OPAKOVANOU AKTIVÁCIOU, ktorá vzniká väzbou ozónu na olejové väzby organického olivového oleja. OZOILE® má ochranný, protizápalový a protisvrbivý účinok, pôsobí proti hypoxii, oxidačnému stresu a degeneratívnym procesom. Zároveň vytvára nepriaznivé prostredie pre zmeny mikrobioty. OZOILE® elastifikuje, hydratuje a normalizuje pokožku.


INDIKÁCIE

RIGENOMA® TEJPOVACIA PÁSKA S OPAKOVANOU AKTIVÁCIOU s OZOILE® je unikátna elastická adhezívna páska, aktivovaná pohybom. Aplikovaná dekompresnou technikou redukuje lymfatickú a krvnú stázu, zlepšuje miestnu mikrocirkuláciu, uľahčuje vstrebávanie opuchov, podporuje tvorbu spojivového tkaniva. Obnovuje zdravú funkciu postihnutej pokožky, najmä pri tvorbe nových jaziev, ktoré udržiava elastické bez sťahovania, predchádza tvorbe keloidov a zlepšuje stav už existujúcich keloidov. Indikovaná je pri pooperačných ťažkostiach a všetkých patologických stavoch kože, kde dochádza ku kompresii tkaniva, nedostatočnej mikrocirkulácii, hromadeniu tekutín, toxínov a odpadových látok, čo vedie k zápalu, bolesti a opuchom, napríklad pri ťažkostiach s chrbticou, platničkami, svalmi, šlachami a kĺbmi. RIGENOMA® TEJPOVACIA PÁSKA S OPAKOVANOU AKTIVÁCIOU s OZOILE® môže byť tiež doplnkom rehabilitačných terapií a ich udržiavacej fázy.

AKO POUŽÍVAŤ

RIGENOMA® TEJPOVACIU PÁSKU S OPAKOVANOU AKTIVÁCIOU s OZOILE® aplikujte dekompresnou technikou, to znamená bez ťahu a v smere maximálnej elasticity pokožky. Špecifická technika aplikácie závisí od oblasti a účelu použitia.

Po 12–24 hodinách po aplikácii aktivujte mikrobunky pásky nanesením prípravku RIGENOMA® sprej alebo RIGENOMA® krém priamo na pásku a opakujte každých 24–48 hodín podľa stavu alebo podľa odporúčania lekára. Pásku odstráňte v okamihu, keď stratí prílnosť.

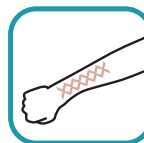

UPOZORNENIE

Len na vonkajšie použitie. Neprehŕtajte. Uchovávať mimo dosahu detí. Nepoužívajte, ak je obal poškodený. Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti. Dátum spotreby sa vzťahuje na neporušený a správne skladovaný výrobok. Uchovávať na chladnom a suchom mieste, mimo zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia. Uchovávať ideálne pri teplote medzi 5 °C a 35 °C. Pred použitím zdravotníckej pomôcky si dôkladne umyte ruky. Po otvorení sa odporúča výrobok spotrebovať do 6 mesiacov. RIGENOMA® TEJPOVACIA PÁSKA S OPAKOVANOU AKTIVÁCIOU s OZOILE® je dobre znášaná. Nie sú známe žiadne prípady senzibilizácie ani nežiaduce účinky. Nepoužívajte v prípade známej precitlivenosti na výrobok alebo niektorú z jeho zložiek. V prípade výskytu takéhoto javu prerušte používanie a poraďte sa s lekárom.

BALENIE

Rolka 5 cm × 5 m



BEZ LEPKU

BEZ LATEXU
HYPOALERGÉNNE
VODEODLNÁ



ERBAGIL s.r.l.
Via L. Settembrini, 13
82037 Telese Terme (BN) Italy
www.erbagil.com



EMPOLAS
Výhradný distributor pre ČR a SR:
EMPOLAS s.r.o.
Česká republika
info@empolas.com
www.ozonidy.sk

ZDRAVOTNÍČKA POMÔCKA